
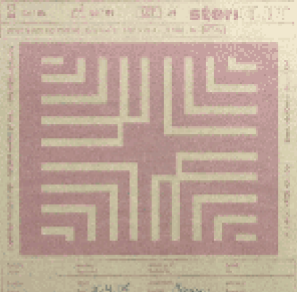



Autoclave	Bowie-Dick Test																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez l'autoclave avec une panier dans laquelle vous avez placé une paquet Bowie-Dick et l'introduisez dans l'appareil au milieu</li> <li>Exécutez un cycle de stérilisation</li> </ul>																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Après le cycle vérifiez si tous les feuilles ainsi le point de la première feuille sont devenus bien rose.</li> </ul>																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collez la première feuille ainsi une du milieu du paquet dans le classeur des protocoles autoclave</li> <li>Marquez la date du test</li> </ul>																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le résultat est mauvais, contactez soit le fournisseur Heiland :                     <table border="1" data-bbox="727 1081 1155 1411"> <tr> <td colspan="2"><b>Heiland Schweiz AG</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Gewerbestrasse 1</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>3421 Lyssach b. Burgdorf</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tel.:</b></td> <td><b>+41 (0)34 448 11 20</b></td> </tr> <tr> <td><b>Fax:</b></td> <td><b>+41 (0)34 448 11 30</b></td> </tr> <tr> <td><b>Gratisfax:</b></td> <td><b>0800 88 11 40</b></td> </tr> <tr> <td><b>E-Mail:</b></td> <td><a href="mailto:info@heiland.ch">info@heiland.ch</a></td> </tr> <tr> <td><b>Homepage:</b></td> <td><a href="http://www.heiland.ch">www.heiland.ch</a></td> </tr> </table> </li> <li>soit le fabriquant Melag :                     <table border="1" data-bbox="574 1570 1310 1749"> <tr> <td>MELAG Technique médicale Geneststraße 9 - 10 10829 Berlin Germany</td> <td><a href="mailto:info@melag.de">email: info@melag.de</a> Tél: + 49 30 - 7579 11-0 Tax: +49 (0) 30 - 75 100 33</td> </tr> </table> </li> </ul>	<b>Heiland Schweiz AG</b>		<b>Gewerbestrasse 1</b>		<b>3421 Lyssach b. Burgdorf</b>		<b>Tel.:</b>	<b>+41 (0)34 448 11 20</b>	<b>Fax:</b>	<b>+41 (0)34 448 11 30</b>	<b>Gratisfax:</b>	<b>0800 88 11 40</b>	<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:info@heiland.ch">info@heiland.ch</a>	<b>Homepage:</b>	<a href="http://www.heiland.ch">www.heiland.ch</a>	MELAG Technique médicale Geneststraße 9 - 10 10829 Berlin Germany	<a href="mailto:info@melag.de">email: info@melag.de</a> Tél: + 49 30 - 7579 11-0 Tax: +49 (0) 30 - 75 100 33
<b>Heiland Schweiz AG</b>																			
<b>Gewerbestrasse 1</b>																			
<b>3421 Lyssach b. Burgdorf</b>																			
<b>Tel.:</b>	<b>+41 (0)34 448 11 20</b>																		
<b>Fax:</b>	<b>+41 (0)34 448 11 30</b>																		
<b>Gratisfax:</b>	<b>0800 88 11 40</b>																		
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:info@heiland.ch">info@heiland.ch</a>																		
<b>Homepage:</b>	<a href="http://www.heiland.ch">www.heiland.ch</a>																		
MELAG Technique médicale Geneststraße 9 - 10 10829 Berlin Germany	<a href="mailto:info@melag.de">email: info@melag.de</a> Tél: + 49 30 - 7579 11-0 Tax: +49 (0) 30 - 75 100 33																		
<p> Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF</p>																			