

Autoclave	Préparation
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilisation générale une dilution à 1.5% c.à.d <ul style="list-style-type: none"> ○ pour 4 litres d'eau ○ 60 ml de désinfectant (avec seringue)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prénettoyage des instruments avec l'aide du "pistolet"
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trempez pendant 15 min
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Montez le bac intérieur
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rincez les instruments avec le pistolet ▪ Sèchez à l'aide de chiffon doux
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emballez ▪ X - assurez que les instruments sont "ouverts"
	<p>IMPORTANT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas de suspicion de H.I.V. une dilution de 2% est à utiliser, c.à.d <ul style="list-style-type: none"> ○ pour 4 litres d'eau ○ 80 ml der désinfectant (avec seringue)
 Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF	