

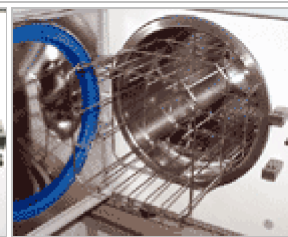

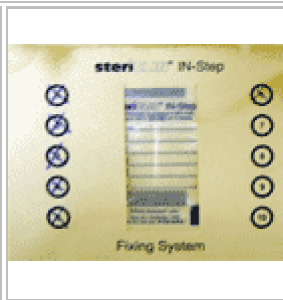





Autoclave	Stérilisation	
	<ul style="list-style-type: none"> Chargez les tiroirs avec les instruments à stériliser Mettez les tiroirs dans l'appareil 	 
	<ul style="list-style-type: none"> Remarque : il y a 2 possibilités, 3 tiroirs et 6 tiroirs pivotez la grille des paniers 90° pour choisir 3 ou 6 paniers 	
	<ul style="list-style-type: none"> Prenez une feuille In-Step et l'insérez dans la fichette et placez l'ensemble dans le tiroir du milieu Fermez la porte <ul style="list-style-type: none"> Une fichette peut être utilisée 10 fois N'oubliez pas de cocher la fichette après chaque stérilisation 	
	<ul style="list-style-type: none"> Allumez l'appareil et attendez un moment Choisissez le programme de stérilisation <ol style="list-style-type: none"> T134° - Universel Instruments emballés - 20 min. T134° - Rapide Non emballé - 15 min. T121° - Schon Pansements, gazes etc - 30 min T134° - Prions Instruments très sales - 20 min T134° Bowie-Dick test 30 min <ul style="list-style-type: none"> Pressez Start 	
	<ul style="list-style-type: none"> Après la stérilisation, marquez les données sur l'In-Step Verifiez si les bandes bleu de la feuille In-Step sont devenue rose Rose veut dire que la stérilisation est réussie En cas d'erreur ou de doute, répétez le processus <ul style="list-style-type: none"> Si la répétition du processus ne résoudre pas l'erreur, exécutez un contrôle Bowie-Dick 	
	<ul style="list-style-type: none"> Scotchez la feuille In-Step sur la feuille de protocole Remplissez les données sur la feuille de protocole La feuille de protocole s'imprime à partir du tableur Autoclave20040928.xls. Elle est prévue pour quatre stérilisations 	



Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF