



ABX Micros CRP	Nouveau Kit CRP 100 - Calibration															
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>À la réception, marquez la date de réception afin d'observer le temps de vie de 2 mois</b></li> <li>▪ Date de péremption : suivant l'emballage</li> <li>▪ <b>Déchets</b> : traiter comme déchets médicaux</li> </ul>															
<table border="1"> <tr> <td>REAGENT</td> <td>1</td> <td>1x17mL</td> </tr> <tr> <td>REAGENT</td> <td>2</td> <td>1x11mL</td> </tr> <tr> <td>REAGENT</td> <td>3</td> <td>1x21mL</td> </tr> <tr> <td>coef.</td> <td>0.79</td> <td>19.9.05</td> </tr> <tr> <td>REF</td> <td colspan="2">0501005</td> </tr> </table>	REAGENT	1	1x17mL	REAGENT	2	1x11mL	REAGENT	3	1x21mL	coef.	0.79	19.9.05	REF	0501005		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyez 9x le bouton <b>Calibrer</b></li> <li>▪ En utilisant les boutons ▲ et ▼ régler au valeur de l'emballage</li> </ul>
REAGENT	1	1x17mL														
REAGENT	2	1x11mL														
REAGENT	3	1x21mL														
coef.	0.79	19.9.05														
REF	0501005															
 <p>Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF</p>																